

FRONTLINE PET CARE

**ENTFERNUNG
VON ZECKEN
BEI HAUSTIER
UND MENSCH**

FRONTLINE PET CARE
Zeckenhaken



FRONTLINE PET CARE ZECKENHAKEN*

Nach jedem Gassigang mit Ihrem Hund beziehungsweise Freigang Ihrer Katze kann Ihr Tier Zecken an sich tragen und mit nach Hause bringen. Daher empfiehlt es sich generell, Haustiere regelmäßig nach Zecken abzusuchen und diese zu entfernen.

Zecken richtig entfernen: Hinweise zur Anwendung

Sie haben eine festgesaugte Zecke auf Ihrem Liebling festgestellt? Mit dem FRONTLINE PET CARE Zeckenhaken entfernen Sie Zecken jeder Größe einfach und mit wenigen Handgriffen.

1. Nehmen Sie den Zeckenhaken und klemmen Sie die Zecke dicht an der Hautoberfläche Ihres Tieres in den Spalt des Zeckenhakens ein.
2. Dann drehen sie den Haken sehr behutsam, bis sich die Zecke gelöst hat.
3. Entsorgen Sie dann die Zecke artgerecht und gleichwohl so, dass keine Gefahr mehr von ihr ausgehen kann.



Immer dabei:
Passt dank
Schleife an
jeden Schlüsselbund



Universeller Spalt:
für alle Zeckengrößen

Universal einsetzbar • Einfach anzuwenden • Für Mensch und Tier



Der Zeckenhaken zur Entfernung dieser Parasiten sollte in keinem Heimtierhaushalt und auch nicht auf Urlaubsreisen fehlen!

* Kein Medizinprodukt

41190-V1-2017